



Alkalischer Reiniger für die maschinelle
Aufbereitung von medizinischen Instrumenten

thermosept® alka clean forte

Unser Plus

- starke Reinigungsleistung zur Risikominimierung einer iatrogenen Übertragung von CJK/vCJK (gem. RKI-Mitteilung)
- gute Materialverträglichkeit
- gute Benetzung und Proteinablösung durch Tensidzusatz

Anwendungsgebiete

thermosept® alka clean forte ist universell einsetzbar, insbesondere geeignet für die Aufbereitung von chirurgischen, mikrochirurgischen und ophthalmologischen Instrumenten, starren Endoskopen, Anästhesiezubehör, Containern und Laborutensilien. Zur Verwendung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Taktbandanlagen.

Anwendungshinweise

Dosierung:

Standardempfehlung: 0,5 % (5 ml/l)

Je nach Grad der Verschmutzung: 0,3 - 1,0 % (3 - 10 ml/l).

Reinigungstemperatur Standard: ca. 55 °C (30 °C - 65 °C),

Reinigungsdauer ca. 5 - 10 Minuten. Die Programmparameter

hängen vom individuellen Grad der Anschmutzungen

der aufzubereitenden Medizinprodukte ab. Für die

Reinigung und die nachfolgenden Programmschritte wird

empfohlen, mindestens enthärtetes, bevorzugt vollentsalztes

Wasser einzusetzen. Ein pH-Wert > 10 wird durch die

Verwendung einer geeigneten Wasserqualität mit der dafür

entsprechenden Dosierung gesichert.

Eine Neutralisation mit thermosept® NKZ oder thermosept®

NKP sichert ein optimales Aufbereitungsergebnis. Unter

Verwendung von geeigneter Wasserqualität (VE-Wasser)

ist eine Neutralisation nicht zwingend erforderlich.

Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Geräte- und

Instrumentenhersteller.



Produktdaten

Zusammensetzung:

Kennzeichnung gem. VO (EG) Nr. 648/2004: < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, < 5 % NTA und deren Salze, < 5 % Polycarboxylate, Enzyme.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,08 g/cm ³ / 20 °C / 1.013 hPa
Farbe	fast farblos
Flammpunkt	> 70 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	12 - 12,8 / 100 % / 20 °C
Viskosität, dynamisch	ca. 3 mPa*s / Methode : ISO 3219

Besondere Hinweise

Konzentrat nicht mit anderen Chemikalien mischen.
Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. Im Originalgebinde lagern.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept alka clean forte 5 kg KA	1/Kanister	147301
thermosept alka clean forte 10 kg KA	1/Kanister	147302
thermosept alka clean forte 20 l KA	1/Kanister	147308

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810

Verwandte Produkte

- thermosept® NKP
- thermosept® NKZ

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com. Für individuelle Fragen: Customer Sales Service Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com