

Pflege- und Reinigungsanleitung

für Taschen, Holster und Rucksäcke

Für die Reinigung der rescue-tec Holster, Taschen und Rucksäcke empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

- 1.** Behandeln Sie die verschmutzte Stelle zuerst mit lauwarmer Waschlauge (Kernseife) und einem Schwamm.
- 2.** Im zweiten Schritt verwenden Sie ein flüssiges Waschmittel und eine Handbürste. Üben Sie nur leichten Druck auf die Bürste und das Gewebe aus. Spülen Sie anschließend die gereinigte Stelle mit warmem Wasser ab. Wenn das Reinigungsergebnis nicht zufriedenstellend ist, können Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen.

Hinweis! Das Gewebe kann sich im Laufe des Reinigungsvorgangs farblich verändern.

- 3.** Trocknen Sie Holster, Tasche oder Rucksack an einem trockenen, warmen Ort. Achten Sie darauf, dass die Gewebelagen nicht aufeinander liegen. Stopfen Sie den Innenraum ggf. für die Trocknungsphase mit Zeitungspapier aus.
- 4.** Verwenden Sie zur Auffrischung des Oberflächenschutzes des Gewebes ein Imprägnierspray für Kunstfasern. Die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften werden so verstärkt. Die Reißverschlüsse können mit einem Trockenschmierstoff, z. B. Silikonspray, behandelt werden.

