

Perfusor® Space

Kurz-Gebrauchsanweisung

Inbetriebnahme und Infusionsbeginn

1. Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie Spritzenbügel und Pumpenklappe und legen Sie die Spritze ein.
2. Schliessen Sie Spritzenbügel sowie Klappe und bestätigen Sie den Sprizentyp mit . Stellen Sie die Patientenverbindung her.
3. Gegebenenfalls Med. Datenbank mit  auswählen oder direkt Therapieparameter mittels  anwählen/eingeben, danach mit  starten.

Förderrate ändern

1. Drücken Sie , geben Sie die neue Rate mit  ein und bestätigen Sie diese mit , um mit der neuen Förderrate fortzufahren.

Spritzenwechsel und neuer Therapiestart

1. Drücken Sie , um die Infusion zu stoppen und unterbrechen Sie die Patientenverbindung.

2. Öffnen Sie den Spritzenbügel. (wird der Spritzenbügel erst nach 30 Sek. gezogen, so muss der Spritzenwechsel mit  bestätigt werden).
3. Legen Sie eine neue Spritze ein. Schliessen Sie den Bügel sowie die Klappe und bestätigen Sie die Spritze mit .
4. Entlüften Sie wenn nötig mit  und . Um fortzufahren drücken Sie . Stellen Sie die Patientenverbindung wieder her und prüfen Sie die Therapieparameter mit .
5. Mittels  setzen Sie die Therapie fort.

Gerät Ausschalten

Befolgen Sie Schritt 1 – 2 vom Punkt Spritzenwechsel (ohne einlegen einer neuen Spritze) und drücken Sie nach dem schliessen der Klappe sowie Spritzenbügel für 3 Sekunden .

Infusomat® Space

Kurz-Gebrauchsanweisung

Inbetriebnahme und Infusionsbeginn

1. Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.
2. Um mit dem Einlegen der Leitung zu beginnen, drücken Sie  und anschliessend , um die Pumpentür zu öffnen.
3. Infusionsleitung von rechts nach links einlegen und mit einem Finger in den Luftsensor drücken.
4. Pumpentür schliessen und Leitungstyp mit  bestätigen.
5. Gegebenenfalls Med. Datenbank mit  auswählen oder direkt Therapieparameter mittels  anwählen/eingeben, danach mit  starten.

Förderrate ändern

1. Drücken Sie , geben Sie die neue Rate mit  ein und bestätigen Sie diese mit , um mit der neuen Förderrate fortzufahren.

Infusionsleitungswechsel und neuer Therapiestart

1. Drücken Sie , um die Infusion zu stoppen und unterbrechen Sie die Patientenverbindung.

2. Drücken Sie , um die Pumpentür mit  zu öffnen. Den grünen Entriegelungshebel [PRESS] vollständig bis zum Einrasten drücken. Leitung entnehmen und neue Leitung einlegen.
3. Schliessen Sie die Pumpentür, bestätigen Sie die Leitung mit  und öffnen Sie die Rollenklemme.
4. Entlüften Sie gegebenenfalls mit  und . Um fortzufahren drücken Sie . Stellen Sie die Patientenverbindung wieder her und prüfen Sie die Therapieparameter mit .
5. Mittels  setzen Sie die Therapie fort.

Gerät Ausschalten

Befolgen Sie Schritt 1 – 3 vom Punkt Infusionsleitungswechsel (ohne einlegen einer neuen Leitung) und drücken Sie nach dem Schliessen der Pumpentür für 3 Sekunden .