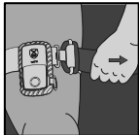
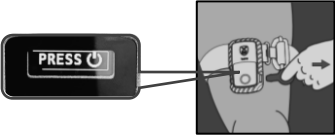


TAK 710 – Gebrauchsanweisung


Ein- oder zweihändige Anwendung

1	Es wird empfohlen, das Tourniquet am obersten Teil der Extremität anzulegen.*	
2	Befestigen Sie die Schnalle und ziehen Sie den Gurt fest, um ihn zu spannen. <i>Der Gurt sollte so fest sitzen, dass die Spitzen von drei (3) Fingern nicht zwischen den Gurt und die Extremität geschoben werden können. Wenn die Spitzen von drei (3) Fingern unter den Gurt geschoben werden können, ziehen Sie ihn erneut fest.</i>	
3	Ziehen Sie den roten Sicherheitsstift heraus. Auf dem Bildschirm wird „Press (Drücken Sie)  “ angezeigt:	

4

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Auf dem Bildschirm wird ein dynamisches Balkendiagramm des Anziehvorgangs des Tourniquets angezeigt, das nach Beendigung der Anziehphase durch einen Zeitzähler ersetzt wird.

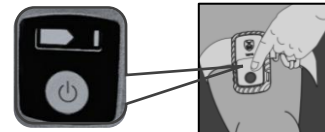

Sicherheitshinweise

Vorsicht

1. Um die Hintergrundbeleuchtung zu deaktivieren/aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
2. Um den Druck auf die Extremität zu verringern oder zu erhöhen, verwenden Sie die Tasten +/- an der Seite des Geräts.

Anmerkungen

1. Nach der Anwendung darf TAK 710 NUR von medizinischem Fachpersonal entfernt werden.
2. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für biologische Gefahrenstoffe.

Haftungsbeschränkung

Xmetix Ltd., deren Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer, Lieferanten und Vertriebspartner übernehmen keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch die Anwendung und Verwendung des TAK710 entstehen. Der Benutzer übernimmt alle Haftungsrisiken.



Der TAK710 darf nur gemäß den Richtlinien der militärischen Dienststelle des Benutzers, der Rettungsdienstbehörde oder unter Aufsicht eines Arztes verwendet werden.

Standard-Anwendungsrichtlinien

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist der TAK710 ein sicheres und wirksames Gerät zur Kontrolle lebensbedrohlicher Blutungen an Extremitäten.

* Wenn Sie sich nicht sicher sind oder aufgrund der Situation keine Zeit haben, die Blutungsquelle zu untersuchen, kann der TAK710 wirksam über der Kleidung so hoch wie möglich am Arm oder Bein angelegt werden. Der TAK710 darf NICHT über harten Gegenständen in der Kleidung angewendet werden. Sobald es die Situation zulässt, sollte die verletzte Extremität untersucht und der TAK710 5 bis 7,5 cm oberhalb der Verletzung direkt auf der Haut neu positioniert werden.