

GEBRAUCHSANWEISUNG

CHEST SEAL TRAINER

1. Schritt

Bitte entnehmen Sie den Simulator aus der Verpackung.

Legen Sie das Applikationspad auf eine glatte und ebene Oberfläche, z.B. Tischoberfläche

2. Schritt

Führen Sie den Schlauch mit dem Konnektor vorsichtig etwa 1-2 cm in den Simulator, seitliche Öffnung.

Stellen Sie direkt neben dem Simulator ausreichend Nitrilhandschuhe bereit.

Übungen bitte ausschließlich mit Handschuhen durchführen!

3. Schritt

Füllen Sie die Schusswunde zur Hälfte mit Kunstblut oder Wasser.

Um einen schäumenden Effekt zu bekommen, mischen Sie hierzu einen kleinen Tropfen Spülmittel mit 5 ml Kunstblut und 5 ml Wasser.

4. Schritt

Drücken Sie jetzt auf den Blasebalg. Ein schlürfendes Geräusch wird in der Schusswunde erzeugt.

5. Schritt

Öffnen Sie jetzt das Chest Seal und entfernen Sie die Folie von der Haftoberfläche. Anschließend streifen Sie das Chest Seal von unten nach oben fest auf die Silikonoberfläche. Notfalls müssen Sie zuvor Kunstblut mit einer Kompresse abwischen.

6. Schritt

Entfernen Sie anschließend das Chest Seal mit gleichmäßigem Zug von der Oberfläche.

Reinigen Sie wenn nötig das Pad nur mit warmem Wasser. Ggf. fügen Sie handelsübliches mildes Spülmittel bei. Reinigen mit vorsichtigen Reiben der Hände. Sollten immer noch Kleberückstände vorhanden sein, nehmen Sie handelsüblichen Spiritus und wischen Sie mit einem Baumwollappen ohne Gewaltanwendung die restlichen Rückstände weg.

