

---

# QUIKLOT®

## ANWENDUNG

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

- > Nur zur externen Anwendung
- > Sterilität bei geöffneter oder beschädigter Verpackung nicht garantiert
- > Bei beschädigter Verpackung entsorgen
- > Kontakt mit den Augen vermeiden
- > Aseptische Techniken anwenden
- > Nicht resterilisieren
- > Kühl und trocken lagern
- > Eine Wiederverwendung wird ein Infektionsrisiko und einen Verlust der Wirksamkeit verursachen

---

### QUIKLOT® 10 x 10, 30 x 30 UND Z-FOLDED SILBERFOLIE:

- 1:** Die hämostatische Wundauflage aus der Verpackung nehmen und unter Einhaltung aseptischer Techniken in das sterile Feld einbringen.
- 2:** Die hämostatische Wundauflage in die Wunde platzieren und zur Anwendung von manuellem Druck direkt auf der Blutungsstelle verwenden. (Bei Bedarf mehrere Wundauflagen verwenden.)
- 3:** Für 3 Minuten bzw. bis die Blutung stoppt, manuellen Druck ausüben.
- 4:** Die hämostatische Wundauflage kann bis zu 24 Stunden belassen werden. Zum Entfernen die Wundauflage vorsichtig abnehmen und die Wunde ausreichend spülen.

---

### QUIKLOT® GAUZE™ Z-FOLDED AUFREISSVERPACKUNG (MILITÄR GRÜN):

- 1:** Öffnen und QuikClot Gauze entnehmen. Leere Verpackung aufheben.
- 2:** Wunde mit QuikClot Gauze tamponieren.  
Bei Bedarf mehrere Packungen verwenden.
- 3:** für mindestens 3 Minuten oder bis Blutung stoppt, Druck ausüben.
- 4:** Druckverband anlegen. Unmittelbar Ärztliche Hilfe aufsuchen.  
Verpackung dem medizinischen Personal zeigen.
- 5:** Entfernen: Gaze aus Wunde entfernen; anschließend Wunde ausreichend spülen

---

### QUIKLOT® EMS ROLLED GAUZE™ UND EMS DRESSING:

- 1.** Die Verpackung öffnen und die QuikClot® Wundauflage entnehmen.  
Die leere Verpackung aufbewahren.
- 2.** Die QuikClot Wundauflage auf die Wunde geben und unter Anwendung von manuellem Druck direkt auf der Blutungsstelle verwenden.  
(Bei Bedarf mehrere Wundauflagen verwenden.)
- 3.** Mindestens 3 Minuten lang oder bis zum Stillen der Blutung Druck ausüben.
- 4.** Einen Druckverband anlegen. Sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.  
Die Anleitungen zum entfernen des Produkts auf der Verpackung dem medizinischen Personal zeigen.

---

### MEDICAL SALES CONSULTANTS AUSTRIA GMBH

Wachaustrasse 13, 3123 Neustift, Austria  
T: +43 2786 631 38, E-Mail: info@medicalsci.com  
Web: www.medicalsc.a.at

### MEDICAL SALES CONSULTANTS GERMANY GMBH

Vor dem Schonekindtor 13, 59494 Soest, Germany  
T: +49 2921 969 78 50, E-Mail: info@medicalscg.de  
Web: www.medicalscg.de