

Desinfektionsmittelkonzentrat

OPTISAL® N

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

- Geeignet für Routineanwendungen
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Angenehm frischer Duft



Produktbeschreibung

OPTISAL N ist ein Desinfektionsmittelkonzentrat für die Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten, medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Es hat einen angenehmen, frischen Duft, da es weder Aldehyde noch Phenole enthält. Zudem besitzt es eine außergewöhnlich hohe Reinigungskraft. Klebeeffekte werden auf Grund der QAV (quaternäre Ammonium-Verbindungen) freien Formulierung vermieden.

OPTISAL N ist besonders zu empfehlen für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden soll. Sehr gut verwendbar für PVC/Linoleumböden.

Anwendungsgebiete

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art.

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten.

Anwendung

Flächenwischdesinfektion: Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			5 min	15 min	30 min	60 min
Anwendungsempfehlung						
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH/EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung		1 %		0,5 %
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: tuberkulozid (M.terrae)	EN 14348	niedrige Belastung				0,5 %
behüllte Viren						
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe und niedrige Belastung		0,5 %		1 %
ergänzende Prüfergebnisse						
bakterizid	EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung		1 %		0,5 %
	EN 13727	niedrige Belastung		0,25 %		
		hohe Belastung		0,25 %		
levurozid	EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung		1 %		0,5 %
	EN 13624	niedrige Belastung		0,125 %		
		hohe Belastung		0,25 %		
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV		1 %		0,5 %

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

Menge der frisch angesetzten **OPTISAL N** Gebrauchslösung vollständig benetzen, diese mechanisch verteilen und abtrocknen lassen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.



OPTISAL® N

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

Anwendungshinweise

Vor erstmaliger Anwendung von **OPTISAL N** ist eine Grundreinigung der Flächen mit einem geeigneten Produkt, wie zum Beispiel mit HANSA CLEAN SPEZIAL zu empfehlen. **OPTISAL N** nicht direkt in Verbindung mit aldehydhaltigen Produkten verwenden.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:
7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Materialverträglichkeit

Die Anwendung von **OPTISAL N** wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Kupfer, Messing, Acrylonitril-Butadien-Styrene (ABS), Polymethylmethacrylate (PMMA), Polycarbonate (PC).

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
OPTISAL N	Sachet	40 ml	200	00-214-0004-01	15869123
	Dosierflasche	1 L	10	00-214-010	03979912
	Kanister	5 L	3	00-214-050	03979929

CE 0482



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGVS und bei der DGKH. www.schumacher-online.com

