



# TRAUMA BANDAGE



## Allgemeine Produktbeschreibung

Die TRAUMA BANDAGE ist ein Notfall-Druckverband, der aus einer saugfähigen Wundauflage (Zetuvit® E, PAUL HARTMANN) besteht, die auf einer elastischen Binde angebracht ist. Auf Höhe der Wundauflage ist auf der gegenüberliegenden Seite der Binde ein Druckapplikator aus Kunststoff angebracht, mit welchem Druck auf die Wunde ausgeübt werden kann. Dieser hat auf zwei Seiten jeweils einen Haken, durch welche die Bandage eingeschlaucht werden kann, um gezielt Druck aufzubauen.

Am Ende der Binde ist ein Verschlussstück angebracht, mit welchem die Binde rasch und einfach mittels Einhaken fixiert werden kann.

Die TRAUMA BANDAGE ist mit Röntgenstrahlen sterilisiert und somit gemäss ISO 11137-1/-2 steril (SAL 10<sup>-6</sup>).

Die TRAUMA BANDAGE ist in drei Breiten erhältlich: 10, 15 und 20 cm. Der Druckapplikator hat bei jeder Breite dieselben Abmessungen.

## Zweckbestimmung

Die TRAUMA BANDAGE ist ein steriler, Einweg-Erste-Hilfe-Verband für die kurzzeitige Behandlung unterschiedlichster akuter Wunden in Notfallsituationen. Sie ist für den Gebrauch an Menschen durch Laien wie auch durch Gesundheitspersonal in jeglicher Umgebung (ausgenommen Operationsaal) geeignet.

## Anwendung/Indikation

Akute Verletzungen sowie oberflächliche Wunden.

# TRAUMA BANDAGE

## Aufmachungen

Name	Breite	REF
TRAUMA BANDAGE 10 cm	10 cm	831 273
TRAUMA BANDAGE 15 cm	15 cm	831 274
TRAUMA BANDAGE 20 cm	20 cm	831 275

## Steriles Medizinprodukt

Die TRAUMA BANDAGE ist steril und vakuumverpackt. Bei beschädigter Verpackung, wenn das Produkt nicht mehr vakuumiert ist, nicht verwenden.

## Einwegprodukt

Die TRAUMA BANDAGE ist ein Einwegprodukt. Die Wiederverwendung von Einweg-Medizinprodukten ist gefährlich. Die Aufbereitung von Produkten für die Wiederverwendung kann ihre Unversehrtheit und Leistung schwerwiegend beeinträchtigen. Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

## Entsorgung

Um mögliche Infektionsrisiken und Umweltverschmutzung zu minimieren, sind die zu entsorgenden Komponenten der TRAUMA BANDAGE gemäss Entsorgungsverfahren unter Einhaltung der geltenden örtlichen Gesetze, Regelungen, Vorschriften und Infektionsschutzstandards zu entsorgen.

## Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit einem identischen Vorschriftenrahmen (Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte) gilt: Ist während der Anwendung des Produkts oder im Ergebnis seiner Anwendung ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten, ist dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten sowie Ihrer zuständigen Behörde zu melden.

# TRAUMA BANDAGE

## Produkteigenschaften

Material	Zusammen- setzung	Vorgaben	Farbe
Binde TRAUMA BANDAGE 10 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Baumwolle</li> <li>▪ PA</li> <li>▪ PU</li> </ul>	10 cm Breite 4,5 m Länge (gedehnt)*	grün
Binde TRAUMA BANDAGE 15 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Baumwolle</li> <li>▪ PA</li> <li>▪ PU</li> </ul>	15 cm Breite 4,5 m Länge (gedehnt)*	grün
Binde TRAUMA BANDAGE 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Baumwolle</li> <li>▪ PA</li> <li>▪ PU</li> </ul>	20 cm Breite 4,5 m Länge (gedehnt)*	grün
Wundauflage TRAUMA BANDAGE 10 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zellulose</li> <li>▪ PP</li> </ul>	10 x 20 cm	weiss
Wundauflage TRAUMA BANDAGE 15 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zellulose</li> <li>▪ PP</li> </ul>	15 x 20 cm	weiss
Wundauflage TRAUMA BANDAGE 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zellulose</li> <li>▪ PP</li> </ul>	20 x 20 cm	weiss
Druckapplikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PC</li> </ul>	L x B x H: 90 x 63 x 4 mm	grau
Verschlussenteil TRAUMA BANDAGE 10 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PC</li> </ul>	L x B x H: 90 x 9 x 12 mm	grau
Verschlussenteil TRAUMA BANDAGE 15 und 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PC</li> </ul>	L x B x H: 115 x 9 x 12 mm	grau
Verpackung TRAUMA BANDAGE 10 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PET</li> <li>▪ ALU</li> <li>▪ PE</li> </ul>	L x B x H: ca. 110 x 85 x 35 mm **	blau
Verpackung TRAUMA BANDAGE 15 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PET</li> <li>▪ ALU</li> <li>▪ PE</li> </ul>	L x B x H: ca. 160 x 85 x 35 mm **	blau
Verpackung TRAUMA BANDAGE 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PET</li> <li>▪ ALU</li> <li>▪ PE</li> </ul>	L x B x H: ca. 210 x 85 x 35 mm **	blau


\* Länge der Binde in unverarbeitetem Zustand bei maximaler Dehnung. Beim verarbeiteten Produkt kann von einer gedehnten Länge von ca. 3,75 m (+/- 0,25 m) ausgegangen werden.

\*\* Dimensionen können durch den Produktionsprozess variieren (Toleranz +/-10 mm)


# TRAUMA BANDAGE

## Kennzeichnung


### Chargenbezeichnung mit 8-stelligem Code

e.g.	0	123	02	41	7
	Jahr	Charge	Produktions- woche	Produktions- werk	Prüf- ziffer

### Herstelldatum

e.g.:		2020	07	01
		Jahr	Monat	Tag

### Verwendbar bis

e.g.:		2025	07	01
		Jahr	Monat	Tag


### Haltbarkeit

5 Jahre


### Medizinprodukt:

**MD**


### Temperaturbedingungen:

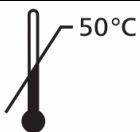

### Unique Device Identification (UDI)

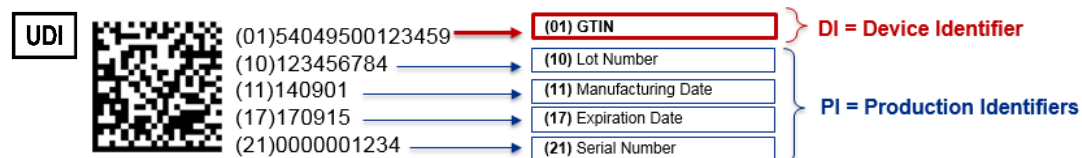

### Einfaches Sterilbarrieresystem

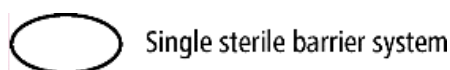

**Latest Date of Revision: 2023-06-14**