





Koniotomie

Notfalltechniken für eine CICO Situation (Cannot Intubate – Cannot Oxygenate)


/ ScalpelCric – Skalpellechnik

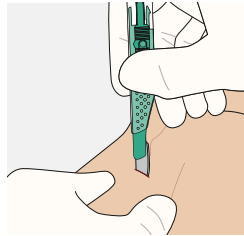


1. Stichinzision

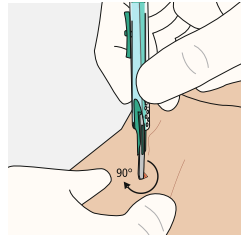

2. Drehung

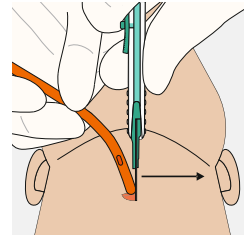

3. Bougie

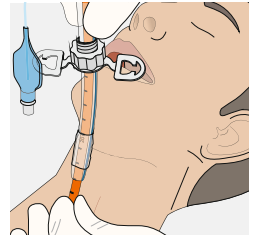

4. Tubus

Das Set wurde gemäß den aktuellen Empfehlungen der DAS (Difficult Airway Society) 2015 Guidelines entwickelt.

Basierend auf der einfachen Beschreibung „**Stichinzision, Drehung, Bougie, Tubus**“ kann mit der ScalpelCric eine eFONA (emergency Front Of Neck Access) in einer CICO Situation (Cannot Intubate – Cannot Oxygenate) schnell durchgeführt werden. Das Set ist in einer speziellen sterilen Instrumententasche verpackt, in der die Komponenten nach Reihenfolge ihrer Anwendung sortiert sind. Dies kann in der kritischen Zeit der Anwendung wichtig sein.

Bestell-
information

ScalpelCric / Zum Einmalgebrauch, steril

REF	VE
30-08-447-1	1

Zusatz-
information



Anwendungsvideo



Kommentierte Bibliografie



Inhalt


- 1 Skalpell # 10
- 2 14 Fr Bougie (40 cm)
- 3 6.0 mm I.D. Tubus mit Cuff
- 4 Verlängerungsschlauch
- 5 Spritze 10 ml
- 6 Halsband




Robuste Verpackung und kompaktes Packmaß für Notfalltaschen, Rucksäcke, Notfallwagen, etc.

Packmaß: 31.5 cm (L)x15.2 cm (B)x5.0 cm (H)
Entfaltetes Maß / Steriles Feld: 56 cm (L)x 39 cm (B)


/ Surgicric II – Klassische chirurgische Technik

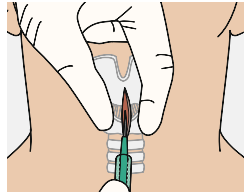


1. Vertikale Inzision der Haut

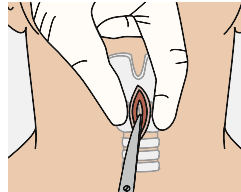


2. Stumpfe Präparation

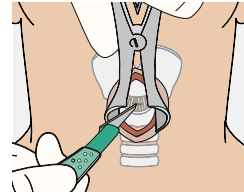


3. Horizontale Inzision der Krikoidmembrane

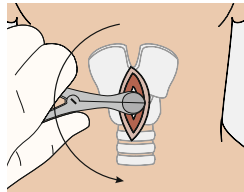

4. Spekulum drehen

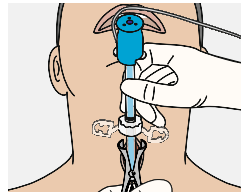


5. Intubation

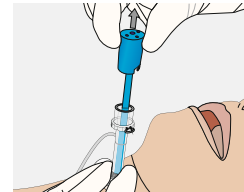

6. Dilatator entfernen

Mit Surgicric II bietet VBM ein Set für die Durchführung einer klassischen chirurgischen Koniotomie an.

Entsprechend dieser Technik enthält das Set alle notwendigen Komponenten.

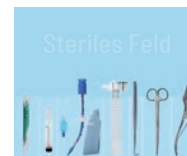

1 2 3 4 5 6 7 8

Inhalt

- 1 Sicherheitsskalpell # 11
- 2 Spritze 10 ml
- 3 6.0 mm I.D. blockbarer Tubus mit Dilator
- 4 Halsband
- 5 Verlängerungsschlauch
- 6 Trachealhaken
- 7 Metzenbaum Schere
- 8 Kilian Spekulum

Bestell-
information

Surgicric II / Zum Einmalgebrauch, steril

REF	VE
30-08-117-1	1

Zusatz-
information



Anwendungsvideo




Kommentierte Bibliografie




Das Set ist in einer speziellen sterilen Instrumententasche verpackt und sofort einsatzbereit.

Packmaß: 31.5 cm (L)x15.2 cm (B)x5.0 cm (H)
Entfaltetes Maß / Steriles Feld: 56 cm (L)x 39 cm (B)


/ Surgicric III – Seldinger Technik

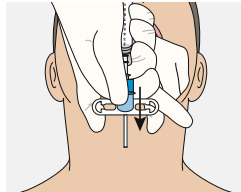


1. Punktion

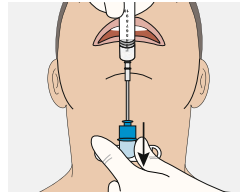


2. Kanüle vorschieben und Nadel entfernen

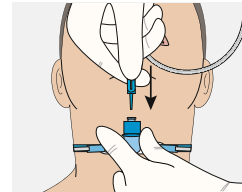


3. Führungsdraht

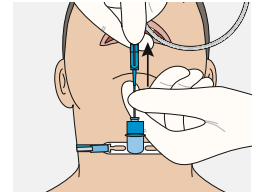


4. Einführhilfe von Führungsdraht entfernen

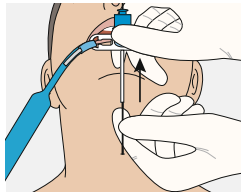


5. Kanüle entfernen

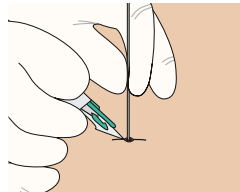

6. Horizontale Inzision der Haut

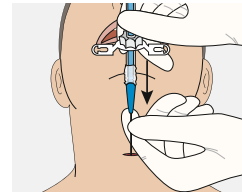

7. Intubation

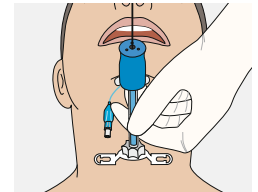

8. Draht und Dilator entfernen

Bei Surgicric III wird der Atemwegszugang mittels Seldinger Technik erreicht. Der Führungsdraht mit spezieller J-Spitze ermöglicht dabei ein atraumatisches Einführen.

Bestell-
information

Surgicric III / Zum Einmalgebrauch, steril

REF	VE
30-08-227-1	1


Zusatz-
information



Anwendungsvideo



Kommentierte Bibliografie

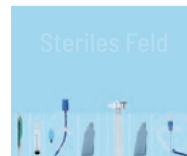

1 2 3 4 5 6 7 8

Inhalt

- 1 Sicherheitsskalpell # 11
- 2 Spritze 10 ml
- 3 6.0 mm I.D. blockbarer Tubus mit Dilator
- 4 Halsband für Tubus
- 5 Verlängerungsschlauch
- 6 Halsband für Kanüle
- 7 Injektionskanüle (Nadel & Kanüle)
- 8 Führungsdraht




Das Set ist in einer speziellen sterilen Instrumententasche verpackt und sofort einsatzbereit.


Packmaß: 31.5 cm (L)x15.2 cm (B)x5.0 cm (H)

Entfaltetes Maß / Steriles Feld: 56 cm (L)x 39 cm (B)


/ Quicktrach I – Punktionskoniotomie

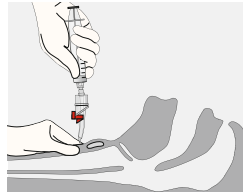


1. Punktion

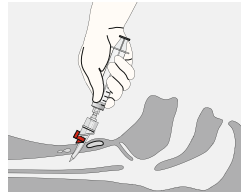

2. Einführung

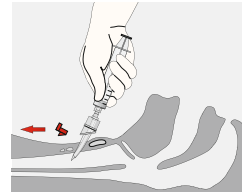

3. Stopper entfernen

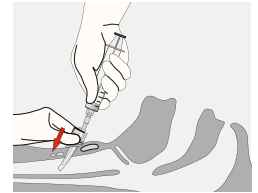

4. Nadel entfernen und
Kanüle vorschieben

Ein Set für die Punktionskoniotomie mittels Nadelinzision.
 Das sterile Besteck ist vormontiert und sofort gebrauchsfertig einsetzbar,
 erhältlich in einer Blisterverpackung oder im Kunststoffrohr.



Blisterverpackung



Kunststoffrohr
 Ideal für Notfalltaschen.
 Maße: (L) 23 cm, (Ø) 5 cm

Bestell-
 information

Quicktrach I / In Blisterverpackung, zum Einmalgebrauch, steril

Patient	Kanüle	REF	VE
Kind	2.0 mm I.D.	30-04-002-1	1
Erwachsener	4.0 mm I.D.	30-04-004-1	1

Quicktrach I / Im Kunststoffrohr, zum Einmalgebrauch, steril

Patient	Kanüle	REF	VE
Kind	2.0 mm I.D.	30-04-902-1	1
Erwachsener	4.0 mm I.D.	30-04-904-1	1

Zusatz-
 information




Anwendungsvideo




Kommentierte Bibliografie


/ Quicktrach II – Punktionskoniotomie

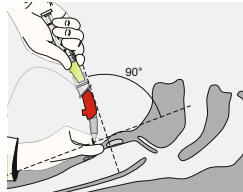


1. Punktion

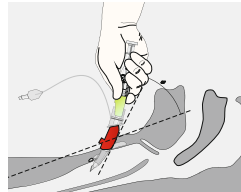


2. Einführung

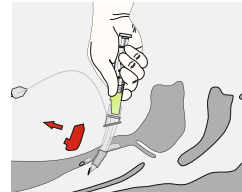


3. Stopper entfernen

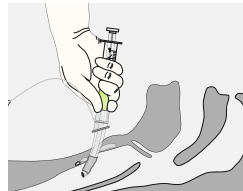

4. Kanüle vorschieben, bis Sicherheitsclip einrastet

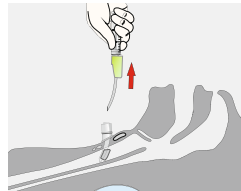

5. Kanüle vorschieben und Nadel entfernen

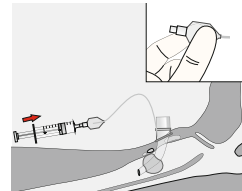

6. Cuff belüften

Ein Set für die Punktionskoniotomie mittels Nadelinzision.
Der Cuff ermöglicht, die Trachea abzudichten. Das sterile Besteck ist vormontiert und sofort gebrauchsfertig einsetzbar, erhältlich in einer Blisterverpackung oder im Kunststoffrohr.



Blisterverpackung



Kunststoffrohr
Ideal für Notfalltaschen.
Maße: (L) 23 cm, (Ø) 5 cm

Bestell-
information

Quicktrach II / Mit Cuff, in Blisterverpackung, zum Einmalgebrauch, steril

Patient	Kanüle	REF	VE
Erwachsener	4.0mm I.D.	30-10-004-1	1

Quicktrach II / Mit Cuff, im Kunststoffrohr, zum Einmalgebrauch, steril

Patient	Kanüle	REF	VE
Erwachsener	4.0mm I.D.	30-10-904-1	1

Zusatz-
information

Anwendungsvideo



Kommentierte Bibliografie

/ Crico-Trainer

Eigenschaften

Crico-Trainer "Adelaide"

Das Kinn ist beweglich, um die Koniotomie unter erschwerten Bedingungen zu üben. Die Haut hat zwei Schichten, um Haut und Krikoidmembran zu simulieren. Komplet mit 5 Häuten.

Bestell- information

Crico-Trainer "Adelaide" / Mit 5 Häuten

REF	VE
-----	----

30-14-700	1
-----------	---



Eigenschaften

Crico-Trainer "Animal"

Zur Befestigung einer Tiertrachea,
komplett mit 10 Häuten.



Crico-Trainer "Animal" / Mit 10 Häuten

REF	VE
30-14-500	1

Bestell-
information**Crico-Trainer "Frova"**

Zum Üben der Koniotomie und perkutanen Tracheostomie,
komplett mit 10 Häuten
und 10 Tracheen.



Crico-Trainer "Frova" / Mit 10 Häuten und 10 Tracheen

REF	VE
30-14-000	1

/ VBM Algorithmus bei schwierigem Atemweg

Plan D

Notfalltechniken für eine CICO Situation (Cannot Intubate – Cannot Oxygenate)



Punktionskoniotomie

Fehlgeschlagen →

Chirurgische Koniotomie



Quicktrach I & II



Surgicric III



ScalpelCric



Surgicric II

Zusatzinformation



Für die komplette Produktpalette besuchen Sie bitte unsere Website www.vbm-medical.de.
Hier finden Sie unsere Mediathek mit zusätzlichen Informationen wie Anwendungsvideos, Prospekte, Flyer, etc.

Bei Interesse an Koniotomie Workshops wenden Sie sich bitte an das **VBM Vertriebsteam**.

Die Medizinprodukte in diesem Werbemittel sind hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.
Die Medizinprodukte in diesem Werbemittel enthalten keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

VBM *Medizintechnik GmbH*

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Folgen Sie uns auf:



CE 0123

FLY009_4.0_DE