



## SUPERB RAPID

Ihr Favorit für die tägliche Anwendung

Im modernen Klinikalltag ist das Thema Hygiene allgegenwärtig und von herausragender Bedeutung - zum Wohle des Patienten und des medizinischem Personals. Genau aus diesem Grund sind alle ERKA GREEN CUFF Superb Manschetten biokompatibel, leicht zu desinfizieren und verfügen über eine wasserdichte, gründlich zu reinigende Oberfläche. Selbstverständlich erfüllen die ERKA GREEN CUFF Superb alle Anforderungen der neuesten AAMI- und AHA Richtlinien über die korrekte Größe von Blutdruckmanschetten. Zusätzlich sorgen deutlich angebrachte Größen- und Positionierungshinweise für ein richtiges Auswählen und fehlerfreies Anlegen der Manschette.

### WIE KANN BEIM BLUTDRUCKMESSEN DIE GEFAHR EINER INFEKTION SOWOHL FÜR PATIENT ALS AUCH MEDIZINER MINIMIERT WERDEN?

Der sicherste Schutz ist hier die Verwendung von Einmal Manschetten. Wir bieten Ihnen hier ein umfassendes Sortiment. Der konsequente Verzicht von PVC und DEHP in unseren Produkten sowie eine optimale Lieferkette verbinden Ökologie und Effizienz in optimaler Art und Weise zu verantwortlichem Handeln.

### WELCHE ALTERNATIVE BIETET ERKA ZUR EINMAL MANSCHETTE?

Alle wiederverwendbaren ERKA GREEN CUFF Blutdruckmanschetten lassen sich wegen ihrer einzigartigen Oberfläche und Materialität besonders gründlich und schnell desinfizieren.

### GIBT ES NOCH MEHR SCHUTZ VON ERKA?

Empfehlenswert ist es, bei der Messung mit wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten den ERKA Hygieneschutzstreifen (Artikelnummer 000.04100) zu verwenden. Dieser verhindert einen direkten Hautkontakt und minimiert somit potentielle Risiken.

### FÜR WELCHE BLUTDRUCKMESSGERÄTE VON ERKA EIGNET SICH DIE EIN-SCHLAUCH-MANSCHETTE?

ERKA KoboldERKA Switch 2.0 Comfort

### FÜR WELCHE BLUTDRUCKMESSGERÄTE VON ERKA EIGNEN SICH DOPPELSCHLAUCH MANSCHETTEN?

Bedingt durch die Anwendung der Membran schonenden Zwei-Schlauch-Technologie kommen in den folgenden Geräten Doppelschlauch Manschetten zum Einsatz: Perfect Aneroid 48Perfect Aneroid 56Perfect Aneroid Klinik 48Perfect Aneroid Klinik 56Profi 48Profi 56Profi Klinik 48

### FÜR WELCHE BLUTDRUCKMESSGERÄTE VON ERKA EIGENEN SICH ZWEI-SCHLAUCH-MANSCHETTEN?

Um bei fixierten Geräten eine größtmöglichen Bedienerkomfort zu erzielen, werden bei folgenden Geräten Zwei-Schlauch-Manschetten verwendet: Erkameter 3000Erkameter 3000 ecoVario

### **SUPERB**

Superb steht für den kompromisslosen Verzicht auf PVC, DEHP und Latex sowohl in der Materialauswahl als auch im Herstellungsprozess.

### **RAPID VERSCHLUSS**

Rapid - clever wie ein Klettverschluss: das super weiche Haft- und Flauschband auf der Manschette verschleißt diese einfach und zuverlässig bei jeder Anwendung.

### **WIE KANN ICH DIE WIEDERVERWENDBAREN ERKA BLUTDRUCKMANSCHETTEN REINIGEN?**

Die folgenden ERKA GREEN CUFF Manschetten verfügen über eine wasserdichte, abwischbare Oberfläche: Superb Rapid Superb Rapid one piece Superb Haken Superb D-Ring Superb Home Smart Rapid Smart Rapid one piece

### **WIE WIRD DIE MANSCHETTE DESINFIZIERT?**

Alle ERKA GREEN CUFF Manschetten lassen sich einfach und zuverlässig durch Sprüh- bzw. Wischdesinfektion desinfizieren. Besprühen Sie den Manschettenbezug mit Desinfektionsmittel und lassen Sie es nach Herstellerangaben einwirken. Alternativ desinfizieren Sie die Manschette mit einem mit Desinfektionsmittel besprühten Tuch und wischen anschließend mit leichtem Druck die Oberfläche ab.

### **WELCHE DESINFIZIATIONSMITTEL EMPFIEHLT ERKA?**

Fugaten® Spray Esemfix® von Schülke Promanum® pur von B. Braun Meliseptol® Foam pur von B. Braun

### WARUM SIND DIE ERKA BLUTDRUCKMANSCHETTEN SO ANGENEHM AUF DER HAUT?

Der Materialmix unserer Manschettenbezüge ist auf maximalen Tragekomfort ausgelegt. So verzichten wir konsequent auf PVC und andere Weichmacher wie DEHP. Hinzu kommt, dass unsere Materialien biokompatibel nach der Norm ISO 10993 sind.

### WIE WIRD DIE MANSCHETTE KORREKT POSITIONIERT?

Um optimale Messergebnisse zu erzielen, muss die Manschette richtig angelegt werden. Alle ERKA GREEN CUFF Blutdruckmanschetten tragen hierfür das deutliche Symbol Arteria Brachialis, mit dessen Hilfe die Positionierung der Manschette fehlerfrei gelingt.

### WELCHE MANSCHETTENGRÖÖE IST DIE RICHTIGE?

Jede ERKA GREEN CUFF hat deutlich zu erkennen einen Range Bereich aufgedruckt. Liegt der Index Balken bei angelegter Manschette vor oder hinter dem Bereich müssen Sie eine kleinere bzw. größere Manschette anwenden.

Superb RapidGröße	Bestellnummer
Größe 4	025.20481.
Größe 4	025.20482.
Größe 4	025.20491.
Größe 4	025.20492.
Größe 4	025.20493.
Größe 5	025.24481.
Größe 5	025.24482.
Größe 5	025.24491.
Größe 5	025.24492.
Größe 5	025.24493.
Größe 3	025.26481.
Größe 3	025.26482.
Größe 3	025.26491.
Größe 3	025.26492.
Größe 3	025.26493.
Größe 2	025.27481.
Größe 2	025.27482.
Größe 2	025.27491.
Größe 2	025.27492.
Größe 2	025.27493.

Größe 1	025.28481.
Größe 1	025.28482.
Größe 1	025.28491.
Größe 1	025.28492.
Größe 1	025.28493.
Größe 6	025.29481.
Größe 6	025.29482.
Größe 6	025.29491.
Größe 6	025.29492.
Größe 6	025.29493.

Zubehör

Größe

Bestellnummer

Ersatzteile



Impressum und Datenschutz

ERKA.  
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Im Farchet 15  
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München  
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:  
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0  
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39  
eMail: [made@erka.org](mailto:made@erka.org)  
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:  
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

WELCHE MANSCHETTENGRÖÖE IST DIE RICHTIGE?

