



Bisono Medical GmbH  
Gungstraße 72  
46238 Bottrop  
Tel.: +49 (0) 2041 75298 00  
Fax: +49 (0) 2041 75298 99  
E-Mail: mail@bisono.de  
Internet: www.bisono.de

### **Aufbereitungsanleitung nur gültig für die BIPROBE CL:**

Die Aufbereitung hat nach dem geltenden Risikomanagement und den Hygienevorschriften des Krankenhauses zu erfolgen.

### **Vorbereitung:**

Bevor Sie die Ultraschallsonde manuell aufbereiten, entfernen Sie falls vorhanden Die Schutzhülle und prüfen die Ultraschallsonde auf äußere Beschädigungen.

## **Manuelle Reinigung der BIPROBE CL**



Im Reinigungsschritt müssen Gelrückstände oder sichtbare Verunreinigungen mit einem Wischtuch von Sonde entfernt werden. Danach sollte eine Sichtprüfung erfolgen, ob alle Verunreinigungen entfernt worden sind.



Bisono Medical GmbH  
Gungstraße 72  
46238 Bottrop  
Tel.: +49 (0) 2041 75298 00  
Fax: +49 (0) 2041 75298 99  
E-Mail: mail@bisono.de  
Internet: www.bisono.de

## Manuelle Desinfektion der BIPROBE CL



Bitte achten Sie darauf, dass das vorgetränkte Desinfektionstuch feucht ist. Breiten Sie das Desinfektionstuch in Ihrer Hand aus und legen Sie die Sonde hinein. In kreisförmigen Bewegungen benetzen Sie die Sonde komplett mit Desinfektionsmittel. Einkerbungen müssen mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Tupfer aufbereitet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Kontakte (Innenseite der Buchse) nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen dürfen. Bitte beachten Sie unbedingt die Einwirkzeiten des Desinfektionsmittelherstellers und ob ein Neutralisationsschritt empfohlen wird.

Getragene Handschuhe sowie die Hilfsmittel zur Desinfektion müssen danach fachgerecht entsorgt werden.



Bisono Medical GmbH  
 Gungstraße 72  
 46238 Bottrop  
 Tel.: +49 (0) 2041 75298 00  
 Fax: +49 (0) 2041 75298 99  
 E-Mail: mail@bisono.de  
 Internet: www.bisono.de

#### Liste freigegebener Reinigungs- und Desinfektionsmittel:

| Name                        | Hersteller              |
|-----------------------------|-------------------------|
| Micobac® Tissues            | BODE Chemie GmbH        |
| Micobac® Virucidal Tissues  | BODE Chemie GmbH        |
| Helizyme®                   | B.Braun Melsungen AG    |
| Cleaner N                   | B.Braun Melsungen AG    |
| Meliseptol® Wipes sensitive | B.Braun Melsungen AG    |
| Meliseptol® Foam pure       | B.Braun Melsungen AG    |
| Meliseptol® Wipes ultra     | B.Braun Melsungen AG    |
| NEUTRA-FLUSH™ Cleaner       | Cantel Medical          |
| CLEANISEPT® WIPES           | Dr. Schumacher GmbH     |
| CLEANISEPT® WIPES FORTE     | Dr. Schumacher GmbH     |
| Incidin™ OxyWipe            | Ecolab Deutschland GmbH |
| Incidin™ OxyWipe S          | Ecolab Deutschland GmbH |
| Sani-Cloth™ Active          | Ecolab Deutschland GmbH |
| mikrozid® sensitive wipes   | Schülke & Mayr GmbH     |
| mikrozid® PAA wipes         | Schülke & Mayr GmbH     |
| Tristel Trio Wipe System    | Tristel                 |
| Tristel Duo ULT             | Tristel                 |
| Tristel Duo Wipes           | Tristel                 |