



FirstCare
A PurSis Medical Company

Emergency Bandage Anwendung



Setzen Sie die Auflage auf die Wunde und wickeln Sie den elastischen Verband um das Körperteil.



Geben Sie den elastischen Verband vollständig in den Druckstab.



Ziehen Sie die Bandage über den Druckstab und drücken Sie diesen auf die Auflage.



Wickeln Sie die Bandage fest über den Druckstab und die Wundauflage.



Fixieren Sie die Enden des Verbandes.



MEIER
Medizintechnik

Friedewalder Straße 22 | 32469 Petershagen

Fon: +49 (0) 5704 - 167 301
Fax: +49 (0) 5704 - 167 302
Web: www.meier-medizintechnik.de
Mail: info@meier-medizintechnik.de

YouTube

